

MODE D'EMPLOI

MASQUE RÉFRIGÉRANT POST-OPÉRATOIRE

1

Sortir le masque et sa housse de l'emballage.

2

Déposer les 2 palettes du masque **dans votre congélateur** **durant 5 heures minimum** afin que tout le liquide de réfrigération soit **entièrement solide à cœur**.

3

Insérer une à une les deux palettes dans la housse préalablement posée sur une table fermeture éclair ouverte, **sangles longues vers le haut**.

Les palettes du masque doivent être **introduites avec le bouchon de remplissage du côté des sangles longues** (haut).


4

Enclenchez la charnière du masque, ajustez la housse et fermez la fermeture éclair.

5

Positionnez votre menton dans le sillon prévu à cet effet à l'intérieur du masque et **ajustez celui-ci en hauteur afin qu'il soit confortablement mis en place**.

Ajustez les sangles hautes sur la tête pour le maintien de la position en hauteur et **les sangles courtes** derrière le haut du crane **pour ajuster le serrage**.

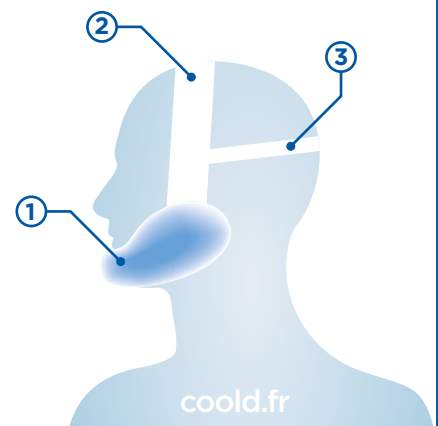

Conseils :

L'efficacité du masque dure environ 2H00, nous vous conseillons de tourner sur deux masques afin d'optimiser l'effet. L'efficacité sera d'autant plus importante que le masque sera mis juste après l'opération. Emmenez vos masques dans une glacière avec deux ou trois pains de glace chez votre chirurgien, clinique ou hôpital afin de bénéficier tout de suite de l'effet.

Composition :

Masque 100 % PEHD
Housse : Memb. Externe : 100 % Polyester
Membrane interne : 100 % lycra

